

Návod

Oční masážní přístroj PulseEye Air

Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte jej.

Obsah manuálu v čínštině byl potvrzen jako autentický. Pokud objevíte typografické chyby nebo nesrovnalosti, kontaktujte nás.

Bezpečnostní upozornění

1. Při připojení k externímu zdroji používejte nabíjecí adaptér s certifikací CCC nebo CQC a hodnotou 5V = 1A nebo vyšší.
2. Před nabíjením se ujistěte, že v okolí nabíjecího portu nejsou cizí předměty (prach, voda). Vyčistěte je, abyste předešli požáru, zkratu nebo úrazu elektrickým proudem.
3. Zařízení při nabíjení neumísťujte na místa s vysokou teplotou nebo do přímého slunečního světla. Po dobití nabíječku ihned odpojte, abyste zabránili nehodám.
4. Během nabíjení je zakázáno zařízení používat.
5. Nezapínejte ani neodpojujte USB kabel mokřima rukama – hrozí úraz elektrickým proudem.
6. Nepoužívejte masážní přístroj při řízení.
7. Nepoužívejte zařízení ve velmi horkém nebo vlhkém prostředí.
8. Osoby s mrtvicí, vysokým nebo nízkým krevním tlakem nesmí tento produkt používat.
9. Nepoužívejte při očních onemocněních (glaukom, šedý zákal, odchlípení sítnice, zánět spojivek).
10. Vyhněte se používání po konzumaci alkoholu.
11. Osoby po očních operacích nebo se srdečním onemocněním by neměly zařízení používat.
12. Před použitím odstraňte kontaktní čočky, sponky a další doplňky.
13. Tento masér je určen pouze pro osobní péči. Nenahrazuje léky ani zdravotnické přístroje.
14. Děti, těhotné ženy a ženy během menstruace by jej neměly používat.
15. Pokud máte citlivou pokožku, alergickou dermatitidu nebo po plastické operaci obličeje, poraďte se s lékařem.
16. Nepoužívejte na obličeji s make-upem – může poškodit líčení nebo dráždit pokožku.
17. Pokud se objeví jakýkoli diskomfort, okamžitě přestaňte používat a kontaktujte lékaře.
18. Masér používejte pouze v oblasti očí – ne na jiných částech těla.
19. Zařízení nesmí být rozebíráno vlastními silami.
20. Není to zdravotnický přístroj a nemůže sloužit k léčbě.
21. Zařízení není vodotěsné – neoplachujte jej ani neponořujte do vody.
22. Nepoužívejte k čištění ředidla, benzín nebo alkohol – mohou poškodit povrch. Používejte neutrální čisticí prostředky.
23. Ukládajte na suchém, větraném místě, mimo sluneční světlo a chemické látky.
24. Zařízení není hračka – děti s ním nesmí manipulovat.
25. Zařízení obsahuje lithium-iontovou baterii. Při likvidaci ji vyjměte (odpojte od napájení, otevřete kryt profesionálním nástrojem, vyšroubujte šroubky a přestřihněte vodiče baterie). Baterii likvidujte samostatně ve sběrném místě.
26. Zařízení není vhodné pro osoby s omezenou pohyblivostí, poruchami vnímání či mentálními poruchami, pokud nejsou pod dohledem zodpovědné osoby.
27. Povrch zařízení může být během provozu teplý – osoby se sníženou citlivostí na teplo musí být opatrné.

Návod k použití

1. **Tlačítko napájení / pohotovostního režimu / režimu:**
Podržte tlačítko po dobu 2 sekund pro zapnutí přístroje.
Výchozí režim je **Vitality**.
Opakovaným stiskem přepínáte mezi režimy:
Soothing – Eye Care – Sleep – Decompression – Vitality.
Podržením po dobu 2 sekund zařízení vypnete a přejdete do pohotovostního režimu.

Popis režimů:

- **Vitality Mode:** vzduchový tlak + vibrace + nahřívání

- **Soothing Mode:** vzduchový tlak + nahřívání
 - **Eye Care Mode:** vzduchový tlak + vibrace
 - **Sleep Mode:** nahřívání
 - **Decompression Mode:** vzduchový tlak
2. **Tlačítko hlasitosti:**
Výchozí hlasitost při zapnutí je úroveň 3.
Opakovaným stiskem přepínáte mezi úrovněmi: **4, 5, Vypnuto–1–2–3–4–5.**
3. **Tlačítko teploty:**
Výchozí teplota nahřívání je **vysoká**.
Opakovaným stiskem přepínáte mezi úrovněmi: **vysoká – střední – nízká – vypnuto.**
4. **Automatické vypnutí:**
Zařízení se automaticky vypne po **5 minutách provozu.**

Běžné závady a řešení

Nelze zapnout

- Vybitá baterie → nabijte zařízení.
- Zařízení se nabíjí → odpojte nabíječku.
- Tlačítko nebylo stisknuto správně → zkuste znovu.
- Technická závada → kontaktujte servis.

Nelze nabíjet

- Kabel není správně připojen → připojte znovu.

Čištění a údržba:

1. Před čištěním prosím vypněte zařízení a odpojte nabíjecí kabel.
2. K čištění povrchu zařízení používejte čistý měkký hadřík.
3. Nepoužívejte žádné korozivní kapaliny (jako alkohol, benzín, čističe skel apod.) k čištění těla zařízení nebo povrchu z umělé kůže, aby nedošlo k poškození, stárnutí nebo změně barvy.
4. Po vyčištění prosím uložte zařízení na suché a větrané místo.
5. Pokud zařízení dlouhodobě nepoužíváte, umístěte jej prosím do úložného boxu.