

HiPro podpora hlavy a krku.


Návod.



Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Obsahuje důležité informace o provozu a bezpečnosti. Uchovávejte tento návod pro budoucí potřebu.

Poznámka: Vzhled a technické detaily produktu se mohou mírně lišit v závislosti na procesu vylepšení, což však nemá vliv na jeho funkčnost.

Součásti produktu

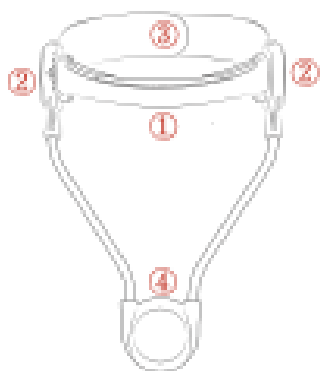

1. Opěrka brady
2. Kloubový spoj
3. Popruhy
4. Hrudní opěrka

Upozornění a varování


1. Nepoužívejte zařízení na spaní.
2. Neponořujte do vody. Čistěte vlhkým hadříkem s jemným čisticím prostředkem.
3. Pokud při používání pocítíte jakékoli nepohodlí, přestaňte produkt používat.
4. Nepoužívejte zařízení při ostrých nárazech.
5. Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích mazlíčků.

Instrukce k použití




1. Upravte opěrku brady směrem dolů blízko k hrudní opěrce.


Poznámka: Zkontrolujte správné nastavení opěrky brady.

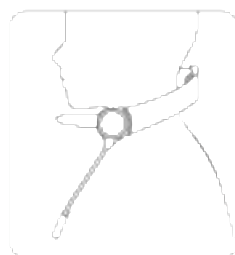

2. Otevřete popruhy a jemně umístěte zařízení mezi bradu a hrud'.

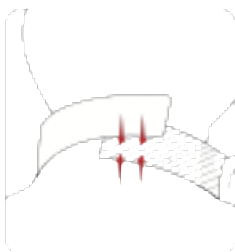


3. Zapněte popruhy kolem hlavy tak, aby byly pevné, ale pohodlné.

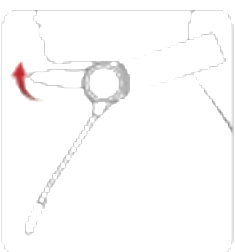

4. Jemně zatlačte na opěrku brady nahoru, dokud neucítíte dostatečnou oporu a pohodlí.

Nastavení opěrky krku

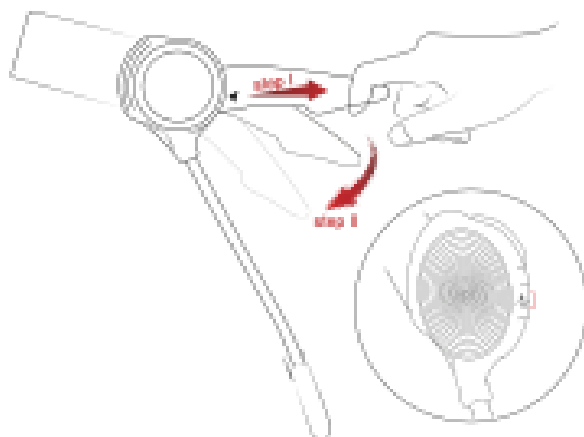

- Pro **snížení** opěrky brady uchopte zařízení jednou rukou a druhou rukou zatáhněte opěrku dopředu a dolů.
- Pro **zvýšení** opěrky brady stačí jemně zatlačit opěrku směrem nahoru.

Životní prostředí

Chcete-li chránit naši planetu, likvidujte zařízení podle místních předpisů o ochraně životního prostředí.