


UV STERILIZAČNÍ TAŠKA FAMILY CARE

Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu!

Důrazně doporučujeme, abyste si před prvním použitím přečetli pokyny, abyste porozuměli všem funkcím a celkové funkčnosti produktu.

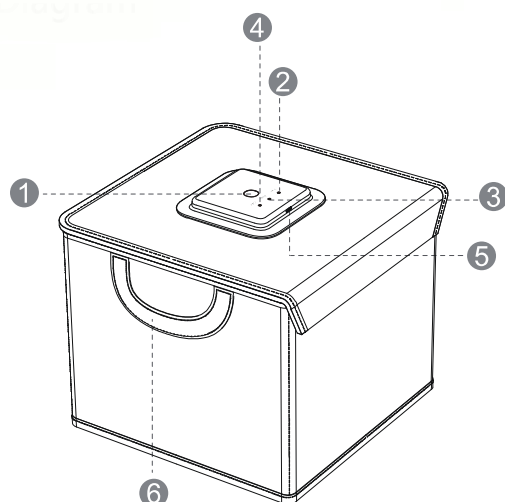

1. zapnutí / vypnutí
2. 10 minutová kontrolka
3. 20 minutová kontrolka
4. 30 minutová kontrolka
5. Napájení Typ C
6. Rukojeť

Specifikace produktu

Název: UVC Sterilizační taška KV24
 Vstupní napětí: DC 5V / 1A
 Velikost produktu: 28*28*24 cm
 Vnitřní velikost: 26,5*26,5*20,5 cm
 UVC vlnová délka: 185nm

Instrukce

1. Vložte předměty, které chcete sterilizovat, do sterilizační tašky.
2. Zavřete sterilizační tašku a poté zapněte napájení pro sterilizaci. Taška má tři sterilizační režimy.
 - 10 minutový sterilizační režim: 1x stiskněte tlačítko, sterilizace probíhá 10 minut.
 - 20 minutový sterilizační režim: 2x stiskněte tlačítko rychle za sebou, sterilizace probíhá 20 minut.
 - 30 minutový sterilizační režim: 3x stiskněte tlačítko rychle za sebou, sterilizace probíhá 30 minut.

Detailní návod

Režim	Kryt		Přepínač			
	SW1	SW2	LED1 10 min	LED2 20 min	LED3 30 min	
Zapnuto	/	/	Svítí			LED1, LED2, LED3 se současně rozsvítí na 3 vteřiny, pak se všechny vypnou zároveň
10 minutová sterilizace	Kryt zavřen	1x stiskněte	ANO	NE	NE	LED1 svítí po dobu sterilizace, poté se vypne automaticky
20 minutová sterilizace	Kryt zavřen	2x stiskněte	ANO	ANO	NE	Po prvních 10 minutách sterilizace se vypne LED2 a LED 1 svítí dále, po dokončení druhých 10 minut sterilizace se vypne i LED1. Sterilizace je dokončena jakmile všechny LED přestanou svítit
30 minutová sterilizace	Kryt zavřen	3x stiskněte	ANO	ANO	ANO	Po prvních 10 minutách sterilizace se vypne LED3, LED 1 a LED 2 svítí dále. Po dokončení druhých 10 minut, se vypne LED 2, LED 1 svítí dále. Po ukončeném cyklu 30min se vypne i LED1 a sterilizace je plně dokončena jakmile všechny LED přestanou svítit.
Sterilizace zastavena	Kryt otevřen	/	NE	NE	NE	Časovač sterilizace resetovaný, sterilizace se spustí automaticky po zavření krytu.
Sterilizace zastavena ručně	Kryt zavřen	Dlouhé stisknutí	NE	NE	NE	
Sterilizace dokončena	/	/	NE			

Obsah sady

UVC Sterilizační taška, USB-C kabel, návod k použití

Důležité upozornění

Nepoužívejte výrobek, je-li poškozen nebo má-li uvolněné spoje. Nepoužívejte výrobek, pokud byl poškozen deštěm nebo vlhkým prostředím. Nevystavujte výrobek přímému slunci a chráňte jej před teplem. Sterilizační tašku/box můžete vyčistit mokrým ručníkem či hadříkem pokud je znečištěná či špinavá. Nemyjte tašku/box ručně nebo strojově či v pračkách.

Nedívejte se přímo do rozsvícené UVC lampy. I malá dávka UVC záření může při delším ozáření oka vyvolat zánět spojivek, případně tzv. chorobu svářečů (ophthalmia fotoelectrica). Při vyšších dávkách může UVC záření těžce poškodit zrak. Pokožka i oči dětí jsou zvláště citlivé na účinky UVC záření. Děti nesmí být vůbec vystaveny přímému ozáření.