

Infračervený masážní pás na koleno

Hlavní vlastnosti

- **Bezdrátové provedení** – pohodlné používání bez kabelů.
- **Pulzní režim a 5 úrovní červeného světla** – přizpůsobte intenzitu dle svých potřeb.
- **Vestavěná baterie 5000 mAh** – dlouhá výdrž na jedno nabití.
- **Tři teplotní režimy** – 45 °C / 50 °C / 55 °C.
- **Tři úrovně vibrací** – M1, M2, M3 pro různé stupně masáže.
- **Ergonomický design** – ideální pro osoby s bolestí, ztuhlostí či diskomfortem v rameni.

Funkce

Zařízení kombinuje **červené a infračervené LED světlo**, **vibrace** a **teplo** pro komplexní uvolnění svalů a zlepšení krevního oběhu. Je vhodné pro každodenní domácí použití i regeneraci po fyzické aktivitě.

- **Červené světlo (660 nm)** a **infračervené světlo (850 nm)** pronikají do hlubších vrstev tkáně a napomáhají regeneraci.
- **Vibrace** pomáhají uvolnit napětí a snížit únavu svalů.
- **Vyhřívání** podporuje prokrvení a zmírňuje ztuhlost.

Ovládání



1. **Zapnutí** – podržte tlačítko napájení po 3 sekundy. (Pokud se zařízení nespustí, je třeba jej nejprve nabít.)



2. **Vibrace** – tlačítko s vlnkou vlevo dole přepíná tři úrovně M1 – M3.



3. **Červené světlo** – prostřední tlačítko se symbolem slunce přepíná pět režimů L1 – L5.



4. Kliknutím na **tlačítko časovače** v levém dolním rohu přepnete nastavení času. Každé kliknutí změni úroveň časovače. K dispozici je **devět časových úrovní: 10 / 20 / 30**.



5. **Zámek dotyku** – jedním stisknutím napájecího tlačítka se aktivuje ochrana proti náhodnému dotyku (ikona zámku).



6. **Vypnutí** – podržte tlačítko napájení po 3 sekundy.

Další informace

- Zařízení se **automaticky vypne po 30 minutách** používání.
- **Nelze používat během nabíjení.**
- Nabíjení probíhá přes **USB Type-C** (nabíjecí kabel je součástí balení).



Technické parametry

Parametr	Hodnota
Model	IRE04
Počet LED diod	105 ks
Napětí / kapacita	5 V 2 A / 5000 mAh
Vlnové délky	660 nm (105 červené) + 850 nm (210 infračervené)
Úrovně světla	L1 – L5
Úrovně vibrací	M1 – M3
Časovač	10 – 20 - 30

Tento produkt není zdravotnickým prostředkem a neslouží k diagnostice, léčbě ani prevenci onemocnění. Použití v lékařském kontextu je možné pouze pod dohledem kvalifikovaného odborníka. Výrobce nenese odpovědnost za nesprávné používání nebo případné zdravotní komplikace.